


# GEBRUIKSAANWIJZING PICADOR SHARPBOX

## Informatie voor eindgebruiker


### I – OMSCHRIJVING

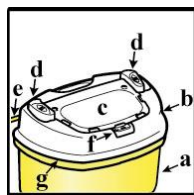

- a- Bak
- b- Deksel
- c- Klep
- d- Drukknoppen
- e- Bevestigingskoord
- f- Sluitlip
- g- Vullijn

### II – ASSEMBLAGE VAN DE CONTAINER


Versie 1,5L - 2,5L - 9L

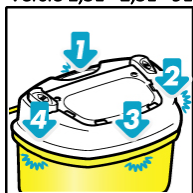

Plaats de bak op een vlakke ondergrond en positioneer de deksel op de sluitrand:

**1- Voorbereiding:** Steek in de aangegeven volgorde elk van de clips (4 of 6 afhankelijk van het model) gedeeltelijk in de sluitrand.


Versie 3,5L - 5,5L - 7,5L

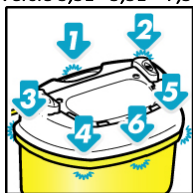

**2- Bevestiging :** Duw de deksel helemaal naar beneden terwijl u alle clips aandrukt.

→ Controleer of alle clips daadwerkelijk onder de rand zichtbaar zijn en dus correct zijn ingestoken.

### III – GEBRUIK VAN HET BEVESTIGINGSKOORD

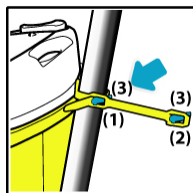


- 1- Het geïntegreerde bevestigingskoord maakt bevestiging aan diverse houders mogelijk.
- 2- Kies de lus die correspondeert met de diameter van de gebruikte houder. (1) (2)
- 3- Steek het koord er doorheen in de richting van de pijl en trek aan het lipje (3) om het koord vast te zetten.
- 4- Druk op het lipje om het koord weer los te maken.

### IV – GEBRUIK VAN DE CONTAINER

**LET OP: overschrijd nooit de vulpeilaanduiding**

*(ter hoogte van het raakpunt van container en deksel, behalve voor de Pi5500 en Pi9000 – zie etiket)*


#### Opening en sluiting van de klep

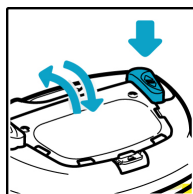

Duw op een van de drukknooppunten om de klep te openen of sluiten.

→ Gebruik van de drukknooppunten voorkomt het risico op prikken en besmetting.


#### Tijdelijke vergrendeling

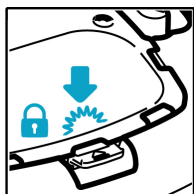

Oefen ter hoogte van de sluitlip druk uit op de klep.

→ Opening van de klep met behulp van de drukknooppunten is niet meer mogelijk.


#### Ontgrendeling

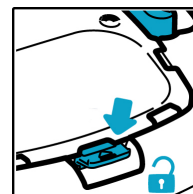

Druk de sluitlip in om de klep te ontgrendelen.

→ De drukknooppunten zijn weer in werking.

### V – VOORZIENINGEN VOOR VERWIJDERING NAALDEN

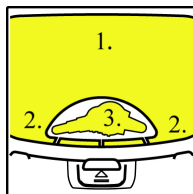

- 1- Brede opening voor grote voorwerpen (scalpels, injectiespuiten met vaste naalden, etc.)
- 2- Verwijderingsysteem voor naalden
- 3- Ontkoppelingssysteem voor injectiepenningen (insuline, hormonen, etc.)

### VI – DEFINITIEVE AFSLUITING



- 1- Sluit de klep.
- 2- Localiseer de 6 sluitzones rond de klep.
- 3- Druk op elk van de zones, beginnend bij de achterzijde (1), vervolgens de voorzijde (2) en tot slot de zijkanten (3).

→ Controleer of de indicatoren voor definitieve afsluiting een correcte weergave vertonen.